

Helicobacter pylori 選択分離用 “KBM” ヘリコバクター血液寒天培地



Helicobacter pylori ATCC 43504

【培養条件】 微好気環境下、35℃、4日間培養

＜コロニー拡大＞



光沢のある
半透明のコロニー

組成	精製水1L当り
ペプトン	17.0 g
エキス類	6.0 g
塩化ナトリウム	5.0 g
デンプン	1.0 g
寒天	15.0 g
馬血液	70.0 mL
選択剤	0.045 g

pH 7.3±0.2

＜特徴＞

- ◆ “KBM” ヘリコバクター血液寒天培地は、胃生検材料中の *Helicobacter pylori* を選択的に分離するための培地です。
- ◆ 特殊な栄養要求性を持つ *H. pylori* の発育支持力を高めるため、馬血液を添加しています。
- ◆ 培地に含まれる選択剤により、検体中に存在する多くのグラム陰性菌やグラム陽性菌及び酵母などの発育を抑制します。
- ◆ 本培地に発育した *H. pylori* は光沢のある半透明のコロニーを形成します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
47170	“KBM” ヘリコバクター血液寒天培地	10枚/袋	¥2,000	冷暗所 (2-10℃)	60日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>