

# Gardnerella vaginalis 選択分離用

## “KBM” ガードネレラ寒天培地



*Gardnerella vaginalis*

【培養条件】嫌気条件下、35℃、2日間培養



$\beta$  溶血の確認  
(裏面より撮影)

### <特徴>

- ❖ “KBM” ガードネレラ寒天培地は、生殖器系臨床材料中の *Gardnerella vaginalis* を選択的に分離するための培地です。
- ❖ *G. vaginalis* の発育に適した培地処方のため、当該菌種に対する高い発育支持性能を有しています。
- ❖ 本培地にはヒト赤血球液が添加されており、*G. vaginalis* のコロニー周囲に明瞭な  $\beta$  溶血環を形成します (*G. vaginalis* は5%ヒツジ血液加寒天培地上では溶血反応を示しません)。
- ❖ 複数の選択剤を組み合わせることにより、*G. vaginalis* の発育を阻害することなく、大部分のグラム陰性菌と酵母様真菌の発育を抑制します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
47160	“KBM” ガードネレラ寒天培地	10枚/袋	¥3,000	冷暗所 (2-10℃)	90日



**KOHJIN BIO**

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>